

## Hur man starta om ett Trygghetslarm inom Ordbo:

1. Tryck in alla kablarna till larmet ordentligt i båda ändar. För att komma åt kablarna i larmet måste du (troligen) [lyfta på luckan på undersidan där sladden/sladdarna går in](#).

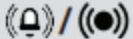





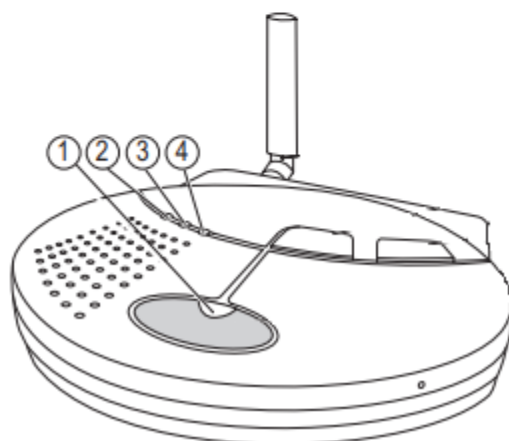
2. Undvik att trycka på någon av knapparna på ovansidan när du hanterar basenheten.
3. Stäng av och sätt på larmet på undersidan - det finns [en svart liten spak](#) jämte strömsladden som man drar åt sidan. Vänta några sek.



4. Sätt på larmet igen.
5. Vänta tills indikeringslampan (2) lyser med fast grönt sken =Normal drift och när "+" tecknet (4) har slocknat = Normal drift

### Indikeringslampor:

<b>1</b>		<b>LARM</b>	<b>RÖD</b>
		Fast sken	Normal drift
		Blinkande	Larmläge
<b>2</b>		<b>PÅ</b>	<b>GRÖN</b>
		Fast sken	Ström
		Blinkande	Strömbrott eller parningsläge
<b>3</b>		<b>FEL</b>	<b>RÖD</b>
		Släckt	Normal drift
		Fast sken	Problem med Ethernet-anslutning* eller IP-konfiguration
<b>4</b>		<b>STATUS</b>	<b>RÖD/GRÖN</b>
		Släckt	Normal drift
		Fast rött sken	Ingen anslutning till GSM-nätet



6. Om inga av indikatorlamporna lyser enligt ovanstående bild, är det troligen problem med strömtillförseln. Prova i ett annat eluttag som du vet fungerar (testa med en lampa, till exempel) Hjälper inte det, byt ut strömadapter.
7. När lampan vid "+" har slocknat, be brukaren provlarma från den bärbara larmknappen.