

Instruktion för överflyttningsplattform

Utprovad till: _____

Personnummer: _____ Datum: _____

Modell:

Molift Raiser



Return



Förflyttning med överflyttningsplattform

- Lås båda hjulen.
- Låt personen göra så mycket som möjligt själv.
- Placera fötter på plattan.
- Kontrollera knästödet.
- Ge motvikt mot genom att placera fot på plattans kant vid uppresning (Se bild nedan).

OBS. Kör ej längre sträckor med överflyttningsplattformen. Endast korta och planerade överflyttningar.



Assisterad förflyttning



Självständig förflyttning

Vänd sida **➡**

Typ av bälte/band:

- Trygghetsband
- Trygghetsband med glidhylsa
- Trygghetsband med bälte
- Returnbelt
- Vårdbälte

Antal personal vid förflyttning:

- 1
- 2

Personliga instruktioner vid förflyttning:

Utprovad av förskrivare: _____

Tel: _____