




Trådlös dörrsensor

Den trådlösa dörrsensorn är utformad för att identifiera behovet av hjälp, särskilt i situationer där brukare på särskilt boende tenderar att lämna sina rum under natten. Det kan finnas hög risk för att falla eller gå vilse när de går på egen hand.

Användarfall

- Exempel 1.** En brukare lämnar sitt rum under nattetid. Han/hon har svårt att gå och det är en hög risk för fall när han/hon går omkring ensam. En ansluten trådlös dörrsensor upptäcker när brukaren öppnar dörren. Sensorn skickar larm till personalens telefon så att personalen får besked om vilken dörr som har öppnats och att brukaren eventuellt har lämnat sitt rum. Personalen kan snabbt komma för att hjälpa till.
- Exempel 2.** En brukare tenderar att gå upp på natten och kan sedan inte hitta tillbaka till sitt rum. Han/hon kan av misstag komma in i andra brukares rum. En trådlös dörrsensor skickar ett larm direkt när en dörr har öppnats. Larmet innehåller information om vilka dörrar som har öppnats och personalen kan snabbt komma till rätt plats och leda brukaren tillbaka till sitt rum.

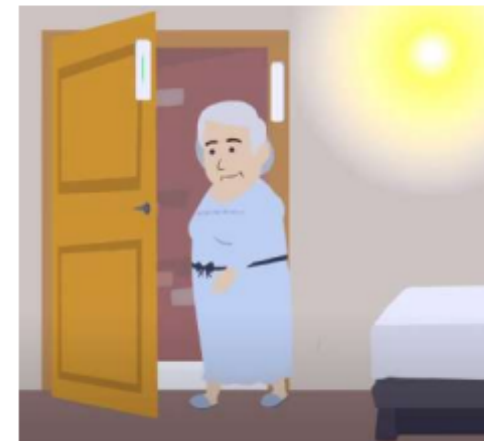



Trådlös dörrsensor - Montering

Kontrollera att:

- Pilarna på sensorn och magnetdelen är riktade mot varandra och i samma höjd (det är lätt att kontrollera när dörren är stängd)
- Det finns max. 1 cm mellanrum mellan sensorn och magnetdelen när dörren är stängd. Om klyftan är större fungerar inte enheten pålitligt.

