



Natt-e trygghetskamera

Exempel på användningsfall:

Personalen får på natten ett larm från brukarens rum. Rörelsedetektorn har upptäckt rörelse i brukarens rum. Det finns en trygghetskamera med tillsynsfunktion i brukarens rum. Personalen kan via Smooth Lite öppna en videoanslutning till rummet för att kontrollera situationen. I videon kan man se att brukaren har gått upp och är på väg till toaletten. Personalen går till rummet för att hjälpa till och återställer sedan larmet genom att avläsa närvaromarkeringen på rummet.





Natt-e trygghetskamera - Tillsyn vid larm i appen



1. Larm kommer till telefonen. Välj uppgiften ur listan.



2. Tryck på "reservera".



3. Tryck på "Visa" för att öppna videoanslutningen.



4. Vänta 5-6 sekunder för videoanslutningen att öppnas.

"LIVE" -texten visar att videoanslutningen är i realtid. Videon spelas inte in.

Anslutningen är enkelriktad. Den andra parten kan inte se eller höra dig.

Avsluta videoanslutningen med X-knappen.



5. Återställning av uppgiften kräver alltid personalens fysiska närvaro och kan inte göras på distans.

För att återställa larmet, gå till rummet och läs närvaro-markeringen. Klicka på återställ larm och sedan lämna rummet.



Natt-e trygghetskamera - Tillsyn utan larm, med närvaromarkering



1. Läs närvaromarkeringen för rummet eller sängen där kameran är placerad.



2. Tryck för att öppna fliken **Rum** () från höger sida av skärmen.



3. Tryck på kameran du vill visa i listan över enheter.



4. Tryck på "Öppna videoanslutning" för att öppna videoanslutningen till rummet.



Natt-e trygghetskamera - Tillsyn utan larm, med närvaromarkering



5. Vänta 5-6 sekunder för videoanslutningen att öppnas.

“LIVE” -texten visar att videoanslutningen är i realtid. Videon spelas inte in.

Anslutningen är enkelriktad. Den andra parten kan inte se eller höra dig.

Avsluta videoanslutningen med X-knappen.



6. Återställning av uppgiften kräver alltid personalens närvaro och kan inte göras på distans.
7. Stäng **fliken Rum** genom att trycka på <-symbolen eller utanför översta bilden.



8. Läs närvaromarkeringen igen för att lämna rummet.