



Talenhet med röstfunktion

- Positionering - fungerar som en nod inne i brukarens rum
- Två programmerbara knappar för begäran om hjälp och hantering av larm
- Information till Smooth Lite
- Samtal (GSM) till talenhet:
 - Brukaren trycker på sin larmknapp eller röd knapp på talenheten
 - Personalen kan ringa till talenheten och förhöra sig om allvaret i larmet
- Personalen kan ringa till brukare genom talenheten utan att denne har larmat
- Den boende kan erhålla ett samtal utan att trycka på knappen
- Samtal endast från fördefinierade nummer (max 15 stycken)



[VIDEO: Talenhet med röstfunktion](#)



Talenhet - Hur man ringer till enheten (om talfunktionen är i bruk)



1. Brukaren gör ett larm från sin larmknapp

2. Larmet kommer upp i Smooth Lite. Välj uppgiften ur listan.

3. Tryck på Reserva.

4. Tryck på Ring.



Talenhet - Hur man ringer till enheten (om talfunktionen är i bruk)

- Talenheten avger en signal och kopplar upp automatiskt. Brukaren behöver inte trycka på knappen för att svara på inkommande samtal.
- Man kan även ringa till talenheten utan att det larmat.

