



Individuella inställningar - Anpassat tidsschema




- Klicka på "Anpassat schema".



- Välj vilka dagar enheten skall skicka larm.
- Klicka på tidsintervallet.



- Välj timme och minut när enheten skall börja skicka larm.
- Välj timme och minut då enheten skall sluta skicka larm.

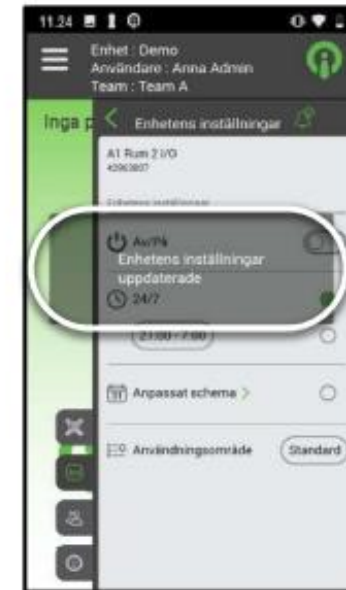

- Klicka på "Fortsätt".
- Klicka på "Spara".
- En grå ruta med texten "Enhetens inställningar uppdaterade" visas.
- Inställningen är nu klar.



Individuella inställningar - Anpassat tidsschema



- Klicka på "+ Lägg till schema" om du vill ha olika scheman.



- Välj vilka dagar enheten skall skicka larm.
- Klicka på tidsintervallet.



- Välj timme och minut då enheten skall börja skicka larm.
- Välj timme och minut då enheten skall sluta skicka larm.



- Klicka på "Fortsätt".
- Klicka på "Spara".
- En grå ruta med texten "Enhetens inställningar uppdaterade" visas.
- Inställningen är nu klar.

Man kan skapa flera olika scheman, t.ex. ett för veckodagar och ett för helger.