

Smooth Lite - Snabbmeny



QR-läsaren – Du kan läsa av 9Solutions QR-koder och streckkoder för att till exempel markera närvaro i ett rum eller för att öppna ett medicinskåp.

Rums-/lokalfunktioner – Denna meny är endast synlig när du markerat närvaro i ett rum. Med menyn kan du hantera rummets/lokalens larm och andra funktioner.

Teamfunktioner – I den här menyn kan du se alla team-medlemmars status; om man har närvaromarkering i något rum eller ifall man är tillgänglig. Du kan även se en lista över alla kameror i teamet och koppla upp dig mot dom.

Tag funktioner – I den här menyn kan du markera närvaro via en tag/larmknapp ifall brukaren larmar från en annan plats än sitt rum

Smooth Lite - Närvaromarkering utan larm

Exempel på händelse:

Personal skall gå in till en brukare för att göra en tillsyn. Personalen startar QR-läsaren i Smooth Lite och skannar närvaromarkeringen.

- Information om personalens närvaro vidarebefordras till övrig personal
- Rummets larmenheter (dörrlarm, rörelselarm) inaktiveras så att de inte genererar onödiga larm när personalen befinner sig i brukarens rum
- När tillsynen är över loggar personalen ut ur rummet och larmenheterna slås automatiskt på igen



Smooth Lite - Närvaromarkering vid larm

Exempel på händelse:

Personalen får ett larm från en brukare i sin Smooth Lite app. Larmet kommer från en brukares rum. För att återställa larmet krävs alltid personalens fysiska närvaro och det kan inte göras på distans.

Genom att antingen först reservera larmet i listan eller genom avläsa närvaromarkeringen bredvid brukarens dörr reserverar personalen larmet för sig själv när hen går in i rummet.

Information om personalens närvaro vidarebefordras också till övrig personal. Samtidigt inaktiveras rummets andra larmenheter så att de inte genererar onödiga larm när personalen befinner sig i brukarens rum.

När personalen lämnar rummet återställer hen larmet genom att antingen klicka på återställ och lämna rummet i appen eller genom att avläsa närvaromarkeringen igen.



Smooth Lite - Larmhantering med närvaromarkering



1. Larm kommer till telefonen. Välj det specifika larmet i listan.

2. Tryck på "Reservera".

3. Avläs närvaromarkeringen med telefonen. Starta QR-läsaren från nedre högra hörnet.

Notera! Händelsen behöver inte väljas.

4. Rikta mobilens kamera mot QR-koden och skanna närvaromarkeringen. Mobilen läser koden automatiskt.

Håll mobilen på ca 10-20 cm avstånd från närvaromarkeringen.

5. Applikationen talar om för dig när markeringen har blivit avläst med ett lyckat resultat "Checkat it"

Att avläsa närvaromarkeringen reserverar uppgiften automatiskt och avaktiverar rummets larmenheter.

Smooth Lite - Larmhantering med närvaromarkering



1. När du har avläst närvaromarkeringen på väggen öppnas en snabbmeny automatiskt.

Menyn anger vilket rum du har loggat in i och listar de aktiva larmen i rummet.



2. Välj "Återställ" för att återställa alla aktiva larm i rummet.
3. Välj "Lämna rummet" för att logga ut från rummet
4. Vid behov kan du i denna meny även aktivera ett Assistanslarm



5. Applikationen visar ett meddelande "Gick ut ur rummet".

När du loggar ut från rummet aktiveras rummets övriga larm automatiskt.

Om du glömmer att logga ut från rummet när du lämnar det aktiveras larmen automatiskt efter 30 minuter. En påminnelse kommer 1 minut i förväg.

Smooth Lite - Närvaromarkering utan QR-kod



1. Reservera larmet.
2. Öppna tagg-menyn.



3. Håll telefonen nära brukarens larmknapp.

Vid behov, tryck med ett kort tryck på den lilla knappen. Appen ger ett hörbart "bling"-ljud och brukaren listas på listan "Hittade personer".



4. Välj rätt brukare från listan.




5. Välj "Återställ".
6. Välj "Avsluta" för att avsluta.

Om man inte avslutar gör appen det automatiskt efter 15 minuter.

Positionering - Hur man söker efter en larmknapp

- En larmknapp kan enkelt hittas via appen Smooth Lite
 - Klicka på "Leta person/utrustning"
 - Skriv rumsnumret i sökfältet
 - Klicka på Knappen som dyker upp

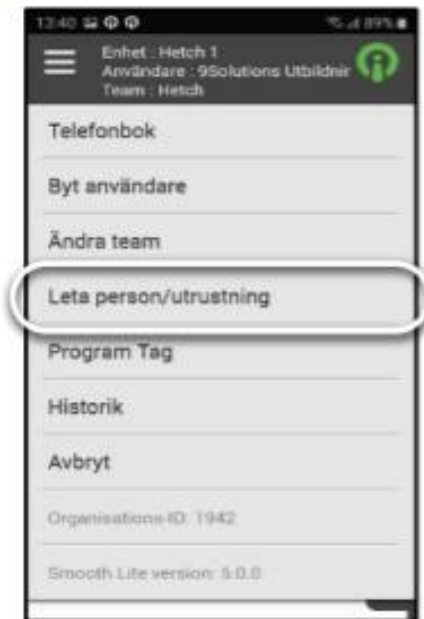

Smooth Lite - Att uppdatera vyn

Emellanåt kan det hända att vyn måste uppdateras för att man ska kunna se ändringar på telefonen:

1. Menyknapp
2. Välj t.ex. Telefonbok
3. Menyknapp
4. Välj larm

