

## **Digitalt Skåplås - Nyckelfri läkemedelshantering**

Digitala skåplås gör det möjligt för personalen att öppna t.ex. medicinskåp med Smooth Lite, vilket möjliggör en säker förvaring av läkemedel.

### **Exempel på användningsfall:**

Sjuksköterskan Sara ska ge läkemedel till en brukare. Sara har i början av sitt arbetsskift loggat in i Smooth Lite med sin personliga PIN-kod. Hon går in i brukarens rum och öppnar appen.

Sara öppnar QR-kodläsaren i appen och läser QR-koden på medicinskåpets dörr. Dörren öppnas och Sara tar ut läkemedlen från skåpet och ger till brukaren. Därefter ställer Sara tillbaka läkemedlen i medicinskåpet, och stänger luckan som låses automatiskt.




## Digitalt Skåplås - Hur låser man upp skåpet?




1. Se till att du är inloggad i Smooth Lite med din personliga inloggningskod.



2. Öppna QR-läsaren genom att klicka på  ikonen till höger på skärmen.



3. Läs QR-koden på skåpet genom att placera din smartphone framför skåpet så att QR-koden är helt synlig i displayfönstret. Håll telefonen på ett avstånd av cirka **10–20 cm** från koden. Telefonen skannar koden automatiskt.

Om det är mörkt i rummet kan du tända ficklampan med hjälp av lampikonen. 



4. Efter genomförd skanning autentiserar Smooth Lite rättigheten för åtkomst och låser upp skåpets dörr.

Pipljudet indikerar att dörren är öppen.

## Digitalt Skåplås - Hur låser man skåpet?



1. Stäng skåpdörren när du är redo.

Du måste vänta 5 sekunder efter att du öppnat låset innan du kan stänga det igen.



2. Stäng QR kod läsaren med krysset.



3. Dörren låses automatiskt när skåpdörren stängs.

**WARNING! Placera aldrig din Smooth Lite-telefon eller ditt nyckelkort i skåpet.**



4. Stäng aldrig dörren utan att batterierna fungerar. Du kan kontrollera batteristatus i Smooth Lite-applikationen.



Tala om för din superanvändare om batterinivån är låg.

## Digitalt Skåplås - Om batterierna tar slut



1. Plocka fram medföljande batteripack/powerbank.



2. Sätt i batterier.



3. Sätt på locket på batteripacket/powerbanken.



4. Tryck in kontakten i det lilla runda uttaget i dörren, vänta några sekunder och lås sedan upp skåpet med Smooth Lite eller ert nyckelkort.