



Handlingsplan för GPS-positionsalarm

Utan säkerhetsområde



För omsorgstagare:

Enhet	Namn	Personnr

Klockan ska sitta på hela dygnet med undantag för laddningen. Laddningen tar ca 45 min, men kan delas upp flera gånger om dagen. Klockan kan sitta på laddning hela natten om PAS bedömer att det inte är någon risk för omsorgstagaren.

Individuell bedömning görs av PAS om omsorgstagaren behöver hållas under uppsikt när GPS-klockan laddas.

Tips lägg in laddningstillfällena i Appva (om enheten använder Appva).

Laddstationen ska alltid sitta i ström centralt i bostaden. Kontrollera att klockan är rätt placerad på omsorgstagaren.

Sätt klockan i laddstationen när omsorgstagaren ska resa bort eller ska till vårdinrättning/sjukhus

Meddela larmsamordnarna omedelbart om klockan försvinner.

Precisionen på klockan kan variera mellan 10 - 200 meter, GPS-signalen kan vara osäker inomhus och vid dåligt väder. Falsklarm kan förekomma.

Om omsorgstagaren eller GPS-larmet försvinner:

- Ring Doro trygghetsjour i Malmö på telnr: **070-600 61 46** (dygnet runt) och begär spårning av omsorgstagaren. Uppge hens behörighetskod _____ och GSM-nr _____
- Doro trygghetsjour beskriver klockans position under samtalet.
- Följ anvisningarna som Doro trygghetsjour ger. Trygghetsjouren finns i telefonen tills omsorgstagaren är funnen/hittad eller tills du är nöjd med anvisningarna.
- Behövs mer hjälp av Doro trygghetsjour, ring på nytt **070-600 61 46**. Uppge behörighetskoden och GSM-nr igen.

Signeras av ordinerande sjuksköterska

Datum	Förnamn	Telefon	Sign



Handlingsplan för GPS-positionsalarm utan säkerhetsområde



Tips för snabbare upphittande

- Använd www.hitta.se för att ha tillgång till karta. Det underlättar mycket att **ha kartan uppe** när Doro Trygghetsjour ger anvisningar för att ni ska hitta omsorgstagaren.
- Sjukhusvistelse/annan vårdplacering/resa bort:
Om omsorgstagaren läggs in på sjukhus/annan vårdplacering eller reser bort ska GPS-larmet stanna hemma och sitta i laddaren. Om GPS-larmet ändå skulle råka följa med är det ytterst viktigt att enheten/SSK lokalisera GPS-larmet **innan** batteriet dör i den. GPS-larmet ska sedan hämtas hem. Om GPS-larmet befinner sig mycket långt bort ska larmsamordnare kontaktas för bedömning av lämplig åtgärd.
- Avsluta GPS-larm eller flyttning – meddela alltid larmsamordnare!

Vid fel/problem skall ALLTID ansvarig sjuksköterska kontaktas

Vid frågor kontakta:

För kommunens verksamheter och privata som använder Lifecare meddelande:

Larmsamordnarna vardagar 8 - 16 Via Lifecare meddelande till larmsamordnare eller via tel. 0470-434 08

för privata verksamheter:

Larm.samordnare@vaxjo.se (använd ej omsorgstagarens personuppgifter i Outlook)

eller via tel. 0470-434 08

Careium Support 020-89 50 00 support.care@careium.com