

www.neatelectronics.se

NEAT Electronics AB
Varuvägen 2
246 42 Löddeköpinge
SWEDEN



HOME

PORTABEL MOTTAGARE

Declaration of Conformity

We NEAT Electronics AB, Varuvägen 2, 246 42 Löddeköpinge, declare under our sole responsibility that our product HOME, NE10 04007-02, is in conformity with the directives 1999/5/CE, 73/23/CE and 89/336/CEE and conforms to the standards:

Safety: EN60950-1:2001
EMC: EN 301489-3 v1.4.1 Class I
Radio: EN 300220-3 v1.1.1

Löddeköpinge, October 2005

Lars Nyström
Managing director NEAT Electronics AB



Viktig information



Behandla produkten varsamt. Försök inte plocka isär produkten. Bara personal som är auktoriserad av NEAT Electronics bör utföra service.



Utsätt inte produkten för öppen eld, tända tobaksprodukter eller temperaturer över 60°C.



När den här symbolen finns på produkten eller förpackningen innebär det att produkten inte får behandlas som hushållsavfall. Den uttjänade produkten ska istället lämnas på för ändamålet avsett återvinningsställe eller skickas till NEAT Electronics. Tänk på att återvinning av material sparar miljön och bevarar naturtillgångarna.

8

1


Inställningar



Håll knapp *pil ner* nedtryckt i 3 sekunder tills ni kommer in i programmeringsläge. Tryck åter knappen *pil ner* så att menyvalet Inställningar visas. Tryck OK.




Här kan *Ljudnivå*, *Vibrator*, *Larmsignal*, *Belysning* och *Knapp ljud* väljas. Markera önskad funktion och tryck därefter OK.

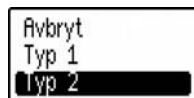

Välj önskat värde med *pil upp* och *pil ner* och tryck därefter OK. HOME återgår sedan direkt till normalläget.

Översikt

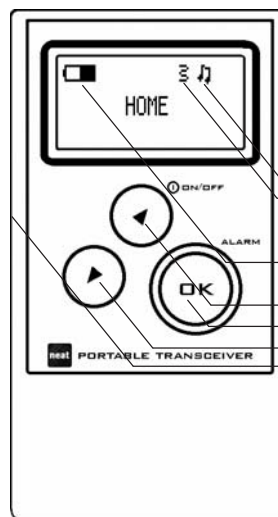

1. Larmsignal på/av
2. Vibrator på/av
3. Batteriindikator
4. På/av, gå upp i meny
5. Kvittera larm, Personallarm
6. Gå ner i meny
7. Laddning, programmering

6

3

Innehåll

Viktig information	1
Komma i gång	2
Översikt.....	3
Sätta på HOME	4
Stänga av HOME.....	4
Navigera i menyn.....	4
Koppla sändare.....	5
Inställningar.....	6
Assistanslarm.....	7
Declaration of Conformity	8

© NEAT Electronics AB 2005-2008
Dokumentnummer NE41 06003-01 v1.3

Komma i gång


1. Anslut laddaren



2. Sätt på HOME genom att trycka på *pil upp*



3. Vänta tills batteriladdnings-
symbolen försvinner

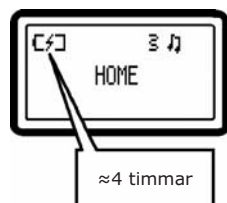

4. Ta bort laddaren



2

Sätta på HOME

- Tryck knappen *pil upp* en kort stund
- Om HOME inte startar, eller om den omedelbart stängs av, anslut laddaren till uttaget 7, se sid. 3

Stänga av HOME

- Tryck och håll knappen *pil upp* nere i tre sekunder tills teckenfönstret släcks

Navigera i menyn


- Tryck knappen *pil ner* i 3-5 sekunder för att gå in i menyn
- Tryck *pil upp* eller *pil ner* för att växla mellan menyvalen
- För att välja ett menyval, tryck *OK*
- Om du vill återgå till normalläget, välj *Avbryt* som finns längst upp eller längst ner i listan

4

Anteckningar

9

Assistanslarm

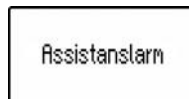

Tryck och håll nere knappen *OK* under 3 sekunder tills texten *Assistanslarm* visas. Larmet skickas nu till övriga HOME enheter inom täckningsområdet.

7


Koppla sändare



Håll knapp *pil ner* i minst 3-5 sekunder tills ni kommer in i programmeringsläge. Stega med *pil ner* till *Programmering* och tryck *OK*.



Välj *Lägg till sändare* genom att trycka *pil ner* och därefter *OK*.

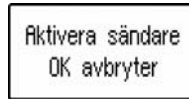

Aktivera den sändare du vill koppla. Om det till exempel är en portabel larmsändare, tryck på den röda larmknappen.



Bläddra mellan texterna genom att trycka *pil upp* och *pil ner*. När du funnit den text som passar bäst, tryck *OK*.



Välj ett nummer som beskriver användaren, t.ex. rumsnummer. Växla mellan fälten genom att trycka *OK* och ändra det markerade fältet genom att trycka *pil upp* eller *pil ner*. För att avsluta, markera *OK*, tryck *pil ner* och därefter *OK*.

5