

# HOME 2G

Portabel larmmottagare

Användarmanual

NE41 13001-01 v1.0

Innehållet i denna användarmanual kan komma att ändras utan föregående meddelande.

NEAT Electronics AB förbehåller sig rätten att utveckla sina produkter eller ändra i innehållet utan att meddela personer eller organisationer om sådana ändringar.

NEAT Electronics AB är inte ansvarigt för data- eller inkomstförlust eller någon som helst påföljande skada.

För mer information, detaljer eller beskrivningar, besök vår hemsida:

[www.neatelectronics.se](http://www.neatelectronics.se)

NEAT Electronics AB  
Varuvägen 2  
SE-24642 Löddeköpinge  
Sweden

Dokumentnummer: NE41 13001-01 v1.0  
Revisionsdatum: 2013-11-07

Alla rättigheter förbehållna.

© NEAT Electronics AB 2013

NEAT Electronics AB intygar att denna mobila enhet, typ NE10 11010-22, överensstämmer med nödvändiga krav och andra bestämmelser:

**Direktiv:**

1999/5/CE (RTTE)  
2004/108/EC (EMC)  
2006/95/EC (LVD)

**Standarder:**

EMC:  
EN 301 489-1 V1.8.1(2008)  
EN 301 489-3 V1.4.1 (2002)  
Radio:  
EN 300 220-2 V2.3.1 Category III

Lågvolt:  
EN 60950-1:2006+A11:2010

Ulrik Lundberg  
VD



## Innehåll


<b>Inledning</b>	<b>3</b>
<b>Delar i paketet</b>	<b>3</b>
<b>Knappsatsen</b>	<b>4</b>
<b>Strömförsörjning</b>	<b>4</b>
<b>Tillbehör</b>	<b>5</b>
Laddstation CHARGE	5
Väska	5
<b>Kom igång med HOME 2G</b>	<b>5</b>
Slå på enheten	5
Slå av enheten	5
Generella funktioner	5
Statusrad	6
<b>Inställningar</b>	<b>6</b>
Ljudnivå	6
Vibration	6
<b>Programmering</b>	<b>7</b>
Lägga till en sändare	7
Radera en sändare	8
Frekvens	9
Driftläge	10
Visar teknisk information om HOME 2G.	10
<b>Larmmottagning</b>	<b>10</b>
<b>Assistanslarm</b>	<b>10</b>
<b>Felsökning (Q&amp;A)</b>	<b>11</b>
<b>Säkerhetsinfo</b>	<b>11</b>
<b>Skötsel och underhåll</b>	<b>11</b>
<b>Tekniska data</b>	<b>12</b>

## Inledning

HOME 2G är en portabel larmmottagare med enkel funktionalitet och hög användarvänlighet.

## Delar i paketet

- 1 x HOME 2G enhet
- 1 x AC-adapter, 230 V

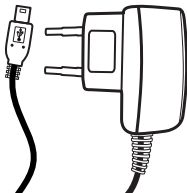


- Denna användarmanual
- Beroende på produktpaket kan det även medfölja:

- 1 x Mini USB-adapter



Om någon del saknas eller är defekt, v.v kontakta din återförsäljare.

## Knappsatsen

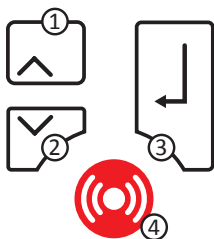

#	Benämning
---	-----------

1	Pil Upp
2	Pil Ner
3	Retur
4	Larmknapp

## Strömförsörjning

AC adaptern kan användas med antingen Mini USB-adapter (tillval) eller laddstationen CHARGE (tillbehör).




*Innan enheten används för första gången bör batteriet laddas fullt.*

## Mini USB-adaptor (tillval)

Anslut AC-adaptern till HOME 2G med Mini USB-adaptern. Snäpp fast adaptern mot undersidan från knappsatsen så den snäpper fast i baksidan på höljet.



*Var noga med att koppla MiniUSB adaptern korrekt!*

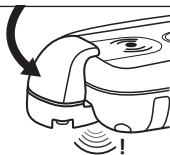


Om HOME 2G är påslagen när den ansluts till laddaren, visas popup bilden **Laddar batteri**.



## Tillbehör

### Laddstation CHARGE

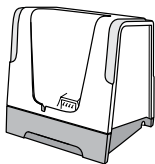

Laddstationen CHARGE finns i enkel och multiutförande för laddning av fler enheter samtidigt.


### Väska

Som tillbehör finns även en praktisk väska som skyddar enheten och gör att HOME 2G kan bäras i bältet.

## Kom igång med HOME 2G

### Slå på enheten

Tryck **Pil upp** och håll intryckt i 3 sekunder. Efter uppstarten visas huvudskärmen.

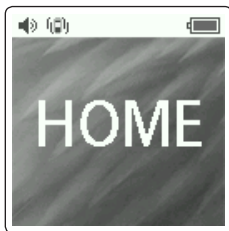

### Slå av enheten

Tryck **Pil upp** i 3 sekunder. Koppla bort ev USB-kabel eller avlägsna från laddstationen innan enheten slås av.

### Generella funktioner

- Navigera upp och ner i menyerna genom att trycka på **Pil upp** och **Pil ner**.
- Det aktuella värdet/valet är markerat i mörkgrått.

- Bekräfta/välj ett värde genom, att trycka på **Retur**.
- Återgå till huvudskärmen genom att välja **Avbryt** från huvudmenyn.
- Välj **Tillbaka** i en meny för att återgå till den föregående menyn.
- Återgå direkt till huvudskärmen från genom att välja **Tillbaka** och hålla **Retur** nertryckt.
- Pop up bilder stängs automatiskt efter 5 sekunder.

### Gå in i menyerna

Gå in i menyerna genom att trycka på **Pil ner** från huvudskärmen och hålla intryckt i 2,5 sekunder.



## Statusrad



De fyra ikonerna i statusraden är från vänster till höger:

- Ljud på
- Vibrator på
- Nytt larm
- Batteriet laddar/batterinivå

## Inställningar

### Ljudnivå

Justera ljudnivån i **Huvudmeny> Inställningar>Ljudnivå**.

### Vibration

Slå på eller av vibration i **Huvudmeny >Inställningar>Vibrator**.

### Bakgrundsbelysning

Slå på eller slå av displayens bakgrundsbelysning och ändra dess tidsparametrar i **Huvudmeny> Inställningar>Belysning**.



Genom att välja "alltid på" minskas standby tiden i batteridrift avsevärt.

## Programmering

### Lägga till en sändare

Gå till **Huvudmeny**>

**Programmering**>Lägg till sändare.



Ett pop up fönster visas och ber om aktivering av sändaren.



Aktivera sändaren. När en sändare mottagits, visar HOME 2G fönstret

Lägg till sändare.



*Ange identifierare*

Välj **Larmklocka** från menylistan och bekräfta.



Bläddra ner till fältet med fyra siffror och skriv in **1** i positionen längst till vänster.



Bekräfta valet genom att trycka **Retur**.



Välj **Spara** för att bekräfta sändarinställningarna eller **Avbryt** för att avbryta.



Sändaren är sparad.



Totalt 3 (tre) sändare kan läggas till i HOME 2G.

### ***Radera en sändare***

Gå till **Huvudmeny>Programmering>Ta bort sändare**.







Välj sändare i listan och tryck **Retur**.



Tryck **Retur** för att radera vald sändare (eller **Pil ner** för att avbryta).



Sändaren är nu raderad.

### **Frekvens**

Ange den frekvens som enheten skall verka i.

- 868.7 MHz
- 869.2 MHz (Standard)
- 869.4 MHz
- 869.2/869.4 MHz
- 906 MHz

## Driftläge

Ange om enheten skall användas fristående eller tillsammans med trygghetstelefon NEO.

- Fristående (Standard)
- Trygghetslarm

Skall enheten användas med trygghetstelefon NEO måste NEO konfigureras i NEO Programmer och Telefonnummer A på fliken **Larmkällor** måste anges protokollet TREX/HOME.

## Teknisk info

Visar teknisk information om HOME 2G.

## Larmmottagning

Aktivera en inlagd sändare. HOME 2G kommer att pipa och ett popup-fönster visar larmet.



*Brevsymbolen i statusraden visar att det finns ett nytt larm och 1(1) i nederkanten visar att detta är det första av totalt 1 nya larm.*

Informationen som visas:

- Utrustning (Larmklocka)
- Radio ID (1000)
- Larmorsak (Larm)



Tryck **Retur** för att kvittera larmet, stänga pop up fönstret och återgå till huvudskärmen.

## Assistanslarm

Tryck och håll **Alarmknapp** nertryckt i 2,5 sekunder för att skicka ett assistanslarm till alla andra HOME 2G i systemet.

När larmet skickats visas pop up skärmen nedan.



## Felsökning (Q&A)

### **Q: HOME 2G startar inte**

A: Är batteriet fulladdat?

A: Är TREX 2G ansluten via USB (laddstation) till en dator? Om ja, koppla ifrån och försök igen.

### **Q: HOME 2G reagerar inte på larm från inlagda sändare**

A: Är sändaren korrekt inlagd i HOME 2G?

Se **Lägga till en sändare**.

A: Är **Frekvens** i enheten ändrad/korrekt?

## Säkerhetsinfo

- Försök inte öppna enheten eller laddaren. För reparation, kontakta en NEAT återförsäljare.
- Batteriet har en begränsad livslängd. Batteribyte får enbart utföras av utbildad personal.
- Använd endast originalladdare, art nr: NE31 05001-06.

## Skötsel och underhåll

- Undvik långvarig exponering i direkt solljus.
- Håll enheten borta från damm, fukt och smuts.
- Vrid, skaka, bänd eller kasta inte enheten.
- Utsätt inte enheten för värme och håll den borta från öppen eld.
- Rengör enheten med en mjuk trasa, lätt fuktad med en mild tvällösning. Rengör inte med starka kemikalier eller lösningsmedel.
- Den uttjänta produkten skall återvinnas och får inte behandlas som hushållsavfall. Återlämna till återvinningsstation eller returnera till NEAT Electronics AB.

## Tekniska data

Standby tid	Ca. 8 dagar
Mått (W x H x D)	48 x 100 x 21 mm
Vikt	Ca 60g, inkl. batteri
Display	128 x 128 pixels, 256
Temp range	+5 - +55°C
Batterityp	Li-Po, 600 mAh
Radiofrekvens	868.7 MHz
	869.2 MHz (Sociala larm)
	869.4 MHz
	906.0 MHz