



Godkänd/Approved by

Anders Björkman

Datum/Date

2013-03-13

Utgåva/Issue

1

Utfärdare/Issued by

Kristoffer Nilsson

- TRES 2G:
Koppla sändare

I följande exempel lägger man in en sändare, t.ex. en ATOM, i "Rum 1".

1. Till en början så ska du se startbilden i mottagaren:



2. Tryck pil ner. Detta gör att du kommer till huvudmenyn. Välj "Programmering" (längst ner) och tryck på den största knappen på mottagaren ("Retur").
3. Använd pil upp för att ange lösenord "1000".
4. Tryck på Retur 4 gånger för att komma vidare till nästa meny.
5. Du kommer nu till programmeringsmenyn:




6. Ha den sändare som du vill lägga in i mottagaren redo. Gå ner i menyn och välj "Lägg till sändare".
7. Nu ber mottagaren dig att aktivera din sändare.
8. I fallet med en ATOM så aktiverar du den genom att trycka på den röda knappen på sändaren.
9. När mottagaren får en signal från sändaren så kommer följande meny:



10. I menyn "Inget ID" kan man välja om sändaren ska vara bundet till ett rum, person m.m. Tryck på

Retur och välj "Rum".

11. Tryck pil ner och välj rumsnummer (med hjälp av pilknapparna):

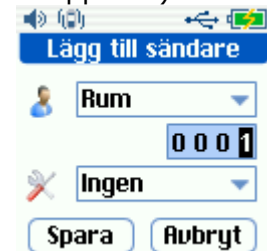

12. Välj pil ner så kommer du till den sista menyn där du väljer vilken sorts larm som gäller – I detta fall "Larmklocka":



13. Välj pil ner så att "Spara" markeras och tryck Retur. Sändaren är nu sparad:





Dokumentnamn/Document name
Koppla/radera sändare
TRES 2G

Info klass/Info class
Publikt

Sida/Page
2 av 2

Godkänd/Approved by

Datum/Date

Utgåva/Issue

Utfärdare/Issued by

Anders Björkman

2013-03-13

1

Kristoffer Nilsson

- TRES 2G:
Radera sändare

1. Från startbilden trycker du på pil ner. Då kommer du till Huvudmenyn där du väljer "Programmering":



2. Nu ombeds du att ange lösenord. Detta gör du med hjälp av pil-tangenterna. Tryck pil upp en gång för att ange lösenordet "1000".

3. Välj vilken sändare i menyn som du vill ta bort:



4. För att ta bort sändaren, tryck Retur. För att ångra, tryck pil ner:



5. Om du trycker Retur så raderas sändaren och du får denna bekräftelse:



Adress
Industrigatan 2
291 36 Kristianstad

Hemsida/e-post
Hemsida: www.zafe.se
e-post: info@zafe.se

Telefon/fax
Tel. Försäljn.: +46 010 209 62 10
Tel. Service: +46 010 209 62 20
Fax.: +46 447809550