

Hur man programmera och provlarma fallarm

1. Ta av fallarmet från omsorgstagarens
2. Håll fallarmet ovanför ditt huvud och släpp det rakt ner i det hårda golvet.
3. Om det behövs, vänd det omedelbart så att du ser den plana vita ytan, **rör sedan inte Vibbyn.**
4. Nu öppnar du luckan på baksidan av trygghetslarmet och trycker en gång på den svarta lilla knappen med det gröna gemet
1. Anslutningsknapp →
5. Kontrollera så att ! på ovansidan av larmapparaten blinkar.
6. Man måste vänta över en minut. Sedan efter 30 sekunder kommer den att börja blinka rött och surra, rör den fortfarande inte. Efter 60 sekunder slutar den blinka. Efter ytterligare 15 sekunder skickas larmet och trygghetslarmet ska börja ringa upp larmcentralen.
7. När operatören svarar, meddela att du testat fallarmet och kontrollera att det är rätt brukare.
8. Efter provlarm ta på omsorgstagaren fallarmet igen, och notera i HSL-journalen att ni har testat, enligt SSK rekommendation



1. Anslutningsknapp 

