

## Hur man starta om ett Eliza trygghetslarm inom Ordbo:

1. Tryck in alla kablarna till larmet ordentligt i båda ändar.




2. Försöka att undvika att trycka på någon av knapparna på ovsidan när du hanterar larmapparaten.
3. Stäng av och sätt på larmet på baksidan - det finns en svart liten skjutsparck jämte strömsladden som man drar åt sidan. Vänta några sek.



4. Sedan sätt på larmet igen. På den svarta lilla skjutknappen på baksidan.

5. Vänta tills indikeringsikonen (3) lyser med fast rött sken = Normal drift och när "!" tecknet (4) har slocknat = Normal drift

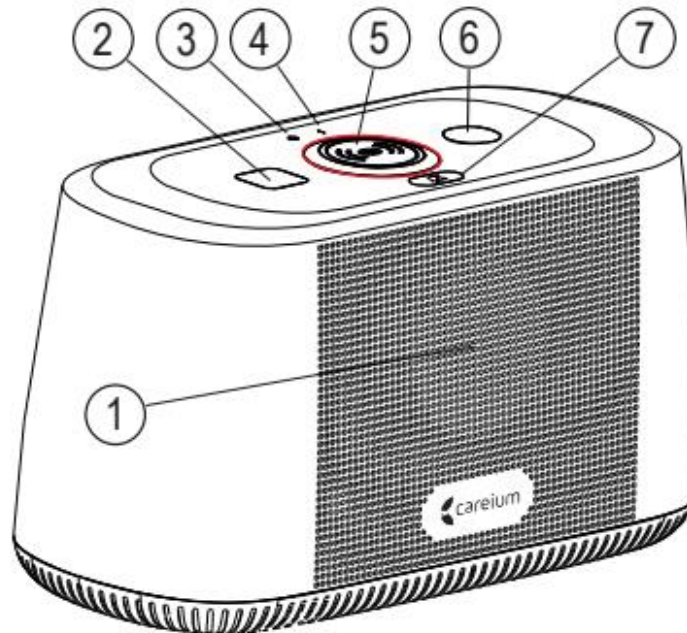

- |                            |                         |
|----------------------------|-------------------------|
| 1. Högtalare               | 5. Larmknapp (röd)      |
| 2. Kvadratisk knapp (grön) | 6. Cirkulär knapp (gul) |
| 3. Strömindikator          | 7. Avbryt larm (vitt)   |
| 4. Statusindikator         |                         |

6. Om inga av indikatorikoner eller lamporna lyser enligt nedanstående bild, är det troligen problem med strömtillförseln/strömadaptern.



7. Prova i ett annat eluttag som du vet fungerar (till exempel testa med en lampa från omsorgstagaren.) Hjälper inte det, byt ut strömadapter mot en ny som ni bör ha med er. Kontakta larmsamordnare.