

MADRASSER

En trycksårspåbyggande madrass är alltid ett komplement till lägesändringar.

Ansvarig
sjuksköterska ska
alltid läsa
bruksanvisningen
innan patienten
använder en
förskriven madrass.



Svenko – mjukfibermadrass

Vid smärtproblematik och VILS. Mjuk bäddmadrass som läggs ovanpå befintlig madrass. Max 75 kg. Har ingen trycksårspåbyggande effekt.

Grad 1

Hudrodnad som
inte bleknar vid
tryck

Grad 2

Delhudskada med
skav eller blåsor
på överhuden

Trycksår upp till kategori 2:

Optimal 5zon BM (bäddmadrass)

Trycksår upp till kategori 2. Max 150 kg. Mjuk och följsam madrass som placeras på befintlig madrass. Höjd: 6 cm.

CuroCell S.A.M (bäddmadrass)

Trycksår upp till kategori 2. Statisk luftmadrass, konstant lågt tryck. Pump tystgående. Placeras ovanpå befintlig madrass. Höjd: 10 cm. Max 200 kg.

Grad 3

Sår som involverar
underhuden

Trycksår upp till kategori 3:

CuroCell Area Zone

Trycksår upp till kategori 3. Självinställande – kombinerar luft och skum – ingen elektrisk pump. Placeras direkt på sängbotten. Madrassen innehåller nio luftceller som är uppdelade i zoner som anpassar sig automatiskt till patienten. Höjd: 18 cm. Max 230 kg. Inbyggd hälffunktion.

Upphandlingen utgått när cirkulerande madrasser är uttjänta kommer den ersättas med Static air HZ.

Static Air HZ EVAQ

Trycksår upp till kategori 3. Bygger på att patienten kan vända sig regelbundet – vilket skapar cirkulation av luften. Om patienten ej kan röra sig bör daglig inspektion göras på hälavlastningen. Max 250kg. Höjd 15 cm.

Grad 4

Djupt nekrotiskt sår
som involverar muskel-,
ben- eller stödjevävnad

Trycksår upp till kategori 4:

CuroCell AUTO420

Trycksår upp till kategori 4. Placeras på sängbotten. Växeltrycksmadrass med hälffunktion. Reglerar självständigt madrassens inre tryck till olika värden beroende på patientens vikt och lägesändring. Ingen manuell åtgärd för inställning av tryck. Tyst pump. Max 250 kg. Höjd: 20 cm.

Upphandlingen utgått när cirkulerande madrasser är uttjänta kommer den ersättas med Opticell 3 PRO.

OptiCell 3 PRO

Trycksår upp till kategori 4. Kombinationsmadrass av luftceller samt skummadrass. Max 230 kg. Höjd: 18 cm. Placeras direkt på sängbotten. Automatiskt inställande på patientens vikt, längd och position.

Kan koppla loss olika celler. Se bruksanvisning.

Huvudceller – luftceller som är kontinuerligt luftfyllda.

Standardceller – luftceller med alternerande lufttryck.

Ventilationsceller – som standardceller men med hål som ventilerar madrassen.

Utgående madrasser – kan bara beställas i mån av att dem finns på lager.

Optimal 5zon

Trycksår upp till kategori 2. Mjuk och flexibel ersättningsmadrass. Max 180 kg. Placeras direkt på sängbotten. Höjd: 14 cm

Optimal 5zon Plus (bäddmadrass)

Trycksår upp till kategori 2. Speciellt framtagen för tyngre patienter. Max 300 kg. Placeras direkt på sängbotten. Höjd: 15 cm.

CuroCell 3 CX13 (bäddmadrass)

Trycksår upp till kategori 3. Placeras ovanpå befintlig madrass eller 6 cm distansmadrass. Växeltrycksmadrass med pump. Max 160 kg. Höjd: 13 cm.