


MP45 SPINAL HYPEREXTENSION BRACE

IFU Brukaranvisning



MP45 SPINAL HYPEREXTENSIONSORTOS

1. Öppna spännet (D) och haka av låshaken (A) från skruven. Ortosen är nu öppen och klar att tas på.
2. Positionera ortosen på framsidan av överkroppen, på bröstet. För låshaken bakom ryggen och fäst den i skruven (A).
3. Försäkra dig om att bröstplatta (B) sitter centrerad på bröstet och att det går bra att sitta ned, att höftdelen (C) är följsam.
4. Dra fast spännet (D). Ortosen ska nu sitta ordentligt.

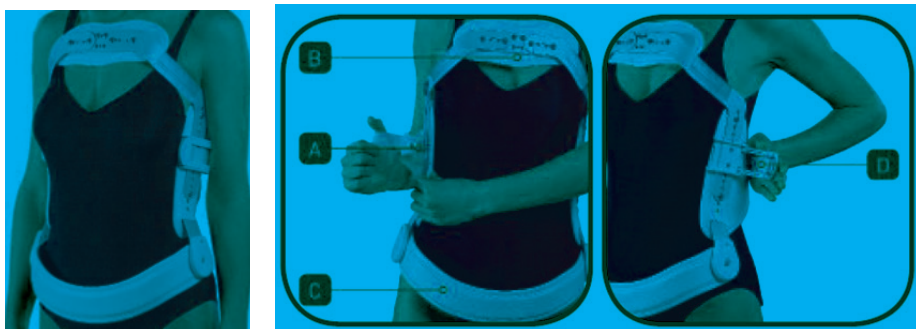

Ortosskötsel

Handtvätta ortosen i högst 30°C med en mild tvål och tvättsvamp. Torka EJ i torkskåp, vi rekommenderar att ortosen torkas av med en handduk. Kontrollera att skruvar och band sitter stabilt med jämna mellanrum. Vid frågor ber vi dig vända dig till din ortopedtekniska verkstad. Lämna även tillbaka din ortos till din ortopedtekniska verkstad efter behandlingen.

Distribueras av Össur Nordic

Össur Nordic
Box 67
751 03 Uppsala
Sweden

TEL +46 (0)18 18 22 00
FAX +46 (0)18 18 22 18
info@ossur.com

 **ÖSSUR**[®]
LIFE WITHOUT LIMITATIONS



WWW.OSSUR.SE