

APPLICERING AV V.A.C.® SIMPLACE™ EX DRESSING

1. Rengör såret enligt sjukhusets rutiner. Se till att omgivande hud är ren och torr.



2. Mät och dokumentera sårets storlek, observera ev undermineringar.



3. Använd ev hudskyddsmedel på omgivande hud



4. Om det är lämpligt, skydda sårkanter/omgivande hud med V.A.C.® sårfilm, hydrokolloid eller ev annan sårfilm.



5. Anpassa/dela V.A.C.® SIMPLACE™ EX förbandet till sårets storlek. Undvik att göra detta ovanför såret så att ej små skumförbandsbitar faller ner i såret.



6. Placera skumförbandet i såret, se till att hela sårytan har kontakt med skumförbandet utan att packa i för mycket. Registrera antalet bitar av skumförbandet (klisteretikett finns i förpackningen för detta ändamål, den fästes på slangen)



7. Klipp till V.A.C.® sårfilm till önskad storlek, bör gå ca 3-5 cm utanför såret. OBS! Vid stora sår, använd flera bitar för enklare hantering, ev remsor för att fixera skumförbanden först och sedan täcka med sårfilmen över.



8. Täck med V.A.C.® sårfilm ca 3-5 cm utanför såret. OBS! Sträck ej sårfilmen, tänk "marsipanlock" på tårta.



9. Klipp ett hål i sårfilmen, stort som "gummiplattan" ca 3 cm i diameter.




10. Ta bort båda vita skyddspapperen på baksidan.



11. Placera SENSAT.R.A.C.™ pad rakt över hålet, tryck så att den fäster.



12. Ta tag i den blå fliken och ta bort skyddsplasten/ stabiliseringslagret.

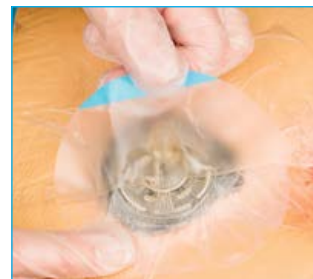

13. Koppla ihop SENSAT.R.A.C.™ slangen med canisterslangen, se till att slangklämmorna är öppna.



14. Starta behandlingen enligt ordinationen.



För mer information kontakta din representant för V.A.C. Therapy:
MEDIQ kundtjänst och support 031 - 388 9110



Obs! Det finns specifika indikationer, kontraindikationer, varningar, försiktighetsåtgärder och säkerhetsinformation för KCI-produkter och terapier. Kontakta läkare och produktanvisningar före användning. Denna information är avsedd för vårdpersonal.

Copyright 2013, 2018 KCI Licensing, Inc. Alla rättigheter förbehållna. Om inte annat anges tillhö alla varumärken KCI Licensing, Inc., dess dotterbolag och / eller licensgivare. PRA-PM-SE-00011 (12/18)

