

Process: 4. Stödja individen för ett tryggt och självständigt liv
Gäller för: Omsorgsförvaltningen
Reviderad: 2024-12-03

Besiktning lyftselar

Bakgrund och syfte

I standarden SS EN ISO 10535:2007 anges att lyftselar för personlyft bör genomgå periodiskt återkommande besiktning med det intervall som tillverkaren/leverantören anger, dock minst var sjätte månad. Tätare besiktningar kan krävas när lyftselen används eller tvättas oftare än normalt. Vid en periodisk besiktning kontrolleras bland annat lyftselsens märklapp – att den är läslig och att lyftband, sömmar och tyget är intakt. Ej godkända selar kasseras och avregistreras enligt lokal rutin. Inspektionen ska genomföras av en person som är lämplig, väl kvalificerad och har god kännedom om konstruktion, användning och skötsel av lyftselar. Besiktning av selen ska kunna följas.

Rutin

Förskrivare ansvarar för att i samband med uppföljning av förflyttning med lyftsele, minst en gång var sjätte månad, göra en besiktning av lyftselen enligt nedan punkter:

- Inspektera etiketten – Det som står på etiketten, märkningen, ska kunna gå att utläsas.
- På etiketten finns årtal när selen tillverkats. Om selen är äldre än 6 år ska den bytas ut på grund av ålder.
- Inspektera lyftband och sömmar – Kantband, sömmar och öglor ska inspekteras för att upptäcka hål, revor, rispör, lösa trådar och annat slitage.
- Inspektera tyget – Tyget ska inspekteras för att upptäcka slitage, hål, revor, lösa tråda, fransning samt förändring i färg och styvhet.
- Inspektera aktuell ordination i HSL-journal – kontrollera även att det finns aktuell lyftanvisning i omvårdnadspärmen.
- Besiktning dokumenteras i journal under aktuell IVP.

Är det något att anmärka på enligt ovan punkter ska lyftselen tas tillbaka omgående och returneras till Hjälpmedelsverksamheten och ny förskrivas. Dokumentera i HSL-journal.

Produktansvaret ligger hos leverantören/tillverkaren om anvisningarna från dem följs.

Viktigt att information ges till enheterna om att inspektion av lyftsele görs i samband med samtliga lyft

När lyftselen återlämnats till Hjälpmedelsverksamheten kontrollerar personal lyftselen, ankomstkontroll utförs på alla produkter enligt de rutiner som finns. För lyftselar sker tre kontroller, innan tvätt, efter tvätt och innan lagerflytt.