

Checklista för besiktning av lyftsele

I samband med uppföljning av förflyttning med lyftsele ska även besiktning av lyftsele utföras enligt rutin, nedan checklista kan användas som stöd.

- Inspektera etiketten. Det som står på etiketten, märkningen, ska kunna gå att utläsas.
- På etiketten finns årtal när selen tillverkats. Om selen är äldre än 6 år ska den bytas ut på grund av ålder.
- Inspektera lyftband och sömmar. Kantband, sömmar och öglor ska inspekteras för att upptäcka hål, revor, rispör, lösa trådar och annat slitage.
- Inspektera tyget. Tyget ska inspekteras för att upptäcka slitage, hål, revor, lösa tråda, fransning samt förändring i färg och styvhet.
- Inspektera aktuell ordination i HSL-journal, kontrollera även att det finns aktuell lyftanvisning i omvårdnadspärmen.
- Besiktning dokumenteras i journal under aktuell IVP.

Är det något att anmärka på enligt ovan punkter ska lyftselen tas tillbaka omgående och returneras till hjälpmedelsverksamheten och ny förskrivs.